

**DE**

Weiche Kontaktlinsen in gepufferter Kochsalzlösung.

Waschen und trocknen Sie sich grundsätzlich die Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.

Die sterile Schutzversiegelung für Kontaktlinsen ist die intakte Blisterverpackung.

 Nicht verwenden, wenn das Sterilbarrieresystem des Produkts oder seine Verpackung beschädigt ist.

**Kontaktlinsen dürfen nicht von mehreren Personen gemeinsam benutzt werden.**

**AUFSETZEN DER KONTAKTLINSEN**

1. Vergewissern Sie sich für jedes Auge, dass die Kontaktlinse nicht umgestülpt ist. Nehmen Sie sie mit dem Zeigefinger auf und kontrollieren Sie deren Form (Abb. 1 und 2).
2. Ziehen Sie mit dem Mittelfinger das Unterlid nach unten und mit dem Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand das Oberlid nach oben. Setzen Sie die Kontaktlinse auf das Auge (Abb. 3). Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge.

**ABSETZEN DER KONTAKTLINSEN**

Schauen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid nach unten. Falten Sie den unteren Rand der Kontaktlinse vorsichtig mit der Fingerkuppe von Zeigefinger und Daumen zusammen und setzen Sie die Kontaktlinse ab (Abb. 4). Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge.

**DESINFIZIEREN/AUFBEWAHREN**

Die Reinigung und Desinfektion von mehr als einmal getragenen Kontaktlinsen (Mehrfachgebrauch durch eine Person) sollte unter strikter Beachtung der Anweisungen auf der Flasche des Kontaktlinsenpflegemittels oder gemäß den Anweisungen Ihres Verschreibers (z. B. Augenarzt, Optometrist oder Kontaktlinsenspezialist) erfolgen. Befolgen Sie die Anweisungen zur korrekten Pflege der Kontaktlinsenbehälter auf der Kontaktlinsenpflegemittelflasche.

Hinweise: Ein-Tageskontaktlinsen sind zum täglichen Tragen geeignet und müssen nach dem Tragen entsorgt werden. Wenn Sie Ein-Tageskontaktlinsen tragen, dann dürfen diese UNTER KEINEN UMSTÄNDEN länger als einen Tag getragen werden.

Ein-Tageskontaktlinsen können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht gereinigt, desinfiziert oder länger als einen Tag getragen werden. Ein-Tageskontaktlinsen können, wenn sie länger als einen Tag getragen werden, beschädigt werden, was zu Risiken bei der Kontaktlinsenpflege führen sowie Augeninfektionen oder andere Probleme auslösen kann.

**SOLLTEN DIE KONTAKTLINSEN AUSTROCKNEN**

Befolgen Sie die oben unter Desinfizieren/Aufbewahren genannten Hinweise.

Produktfamilie des Kontaktlinsenmaterials:	Indikationen	Vorgesehene Benutzer:
comfilcon A <sup>1</sup> , fanfilcon A <sup>2</sup> , methafilcon A <sup>3</sup> , ocufilcon B <sup>4</sup> , ocufilcon D <sup>3,4</sup> , omafilcon A <sup>4</sup> , omafilcon B <sup>2</sup> , riofilcon A <sup>4</sup> , somofilcon A <sup>2,4</sup> , stenfilcon A <sup>4</sup>	Zur Korrektur von Ametropie.	Für Personen mit einer Fehlsichtigkeit und gesunden Augen. Keine Altersbeschränkung; Die Eignung sollte von einem Kontaktlinsenspezialisten (Augenarzt, Augenoptiker oder Optometrist) festgestellt werden.
omafilcon A für das Myopie Management <sup>4</sup>	Für das Myopie Management (zur Verlangsamung des	Zur Versorgung kurzsichtiger Kinder und Teenager im Alter von 6 bis 18 Jahren, nach vorheriger Absprache mit einem

	Fortschreitens Kurzichtigkeit).	der	entsprechend Kontaktlinsenspezialisten.	qualifizierten
--	------------------------------------	-----	--	----------------

<sup>1</sup>Für (kontinuierliches) verlängertes Tagestragen; <sup>2</sup>für Tagestragen; <sup>3</sup>für verlängertes Tagestragen; <sup>4</sup>für tägliches Einmaltragen / Einmalgebrauch.

⊗ Das Symbol auf dem Blister weist darauf hin, dass die Linse für den einmaligen Tagesgebrauch und nicht zur Wiederverwendung bestimmt ist. Ist dieses Symbol nicht vorhanden, ist die Linse für andere Trageperioden vorgesehen.

#### BITTE BEACHTEN SIE

1. Ihr Kontaktlinsenspezialist wird Ihnen für Ihre jeweiligen Kontaktlinsen Empfehlungen zu Auswahl, Tragen, Reinigung und Austausch der Kontaktlinsen geben. Befolgen Sie diese Anweisungen. Bei Fragen lassen Sie sich von Ihrem Augenoptiker oder Augenarzt beraten.
2. Kontaktlinsen sind Medizinprodukte und sollten immer nur von einem Kontaktlinsenspezialisten angepasst werden.
3. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen über einen längeren Zeitraum (über Nacht) kontinuierlich tragen, setzen Sie die Kontaktlinsen bitte am Abend, vor dem geplanten Austausch, ab und entsorgen die Linsen. Setzen Sie am darauffolgenden Morgen ein neues Kontaktlinsenpaar auf.
4. Linsen, die mehr als einmal getragen werden, müssen nach dem Absetzen entsprechend den Anweisungen gereinigt und desinfiziert werden.
5. Sollten Sie beim Tragen der Kontaktlinsen eine Rötung oder Reizung bzw. irgendwelche Schmerzen oder unerwartete Veränderungen beim Sehen feststellen, setzen Sie Ihre Kontaktlinsen unverzüglich ab und konsultieren Sie Ihren Augenoptiker oder Augenarzt.
6. Vermeiden Sie die Verunreinigung der Kontaktlinsen durch Make-up oder Sprays und tragen Sie die Kontaktlinsen nicht in der Nähe gesundheitsschädlicher D-ämpfe.
7. Beschädigte, verunreinigte oder zerkratzte Kontaktlinsen müssen unverzüglich ausgewechselt werden.
8. Vermeiden Sie lange Fingernägel, da sich darunter Bakterien ansammeln könnten und Sie sich außerdem damit an den Augen verletzen oder die Kontaktlinsenbeschädigen könnten. Kratzer an der Augenoberfläche können Infektionen zur Folge haben.
9. Bewahren Sie die Kontaktlinsen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, für die sie nicht bestimmt sind .
10. Beim Wassersport mit Kontaktlinsen sollten Sie Ihre Augen zusätzlich durch eine wasserdichte Schutzbrille schützen.
11. Kontakt mit nicht sterilem Wasser (z. B. Leitungswasser, Mineralwasser, Badewasser, im Schwimmbad oder beim Wassersport) erhöht das Risiko einer mikrobakteriellen Infektion.
12. Wechseln Sie nicht zu anderen als von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Pflegemitteln.
13. Ändern Sie ohne Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten weder den Linsentyp noch dessen Eigenschaften.

#### WARNHINWEISE

1. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen **NICHT** beim Schlafen, es sei denn, Ihr Augenoptiker oder Augenarzt hat Ihnen dazu geraten.
2. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen **NICHT** länger als für den von Ihrem Augenoptiker oder Augenarzt empfohlenen Zeitraum.
3. Verwenden Sie für Ihre Kontaktlinsen **KEINE** Haushaltsprodukte (z. B. Desinfektionsmittel).
4. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen **NICHT**, wenn Sie Augentropfen anwenden (es sei denn, Ihr Augenoptiker oder Augenarzt hat Ihnen dazu geraten).
5. Befeuchten Sie Ihre Kontaktlinsen **NICHT** mit Speichel.
6. Spülen Sie Ihre Kontaktlinsen oder den Behälter **NICHT** mit Leitungswasser ab.

### **Gegenanzeigen (Gründe für die Nichtverwendung)**

Bei Vorliegen einer der folgenden Gegebenheiten, dürfen Sie die Kontaktlinsen **nicht** verwenden.

- Akute und subakute Entzündung oder Infektion der vorderen Augenkammer.
- Jede Augenkrankheit, Verletzung oder Abnormalität an Hornhaut, Bindehaut oder Augenlidern.
- Hornhauthypoästhesie (verminderte Hornhautsensibilität) ohne Aphakie (die natürliche Augenlinse ist vorhanden).
- Schwere Insuffizienz der Tränensekretion (trockene Augen).
- Jede systemische Erkrankung, die Auswirkung auf das Auge haben oder durch das Tragen von Kontaktlinsen verstärkt werden kann.
- Allergische Reaktionen der Augenoberfläche oder des Augenanhanggebildes (Augenlider und -brauen), die durch das Tragen von Kontaktlinsen oder die Verwendung von Kontaktlinsenpflegemittel hervorgerufen oder verstärkt werden können.
- Jede aktive Hornhautinfektion (durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren).
- Wenn eine Rötung oder Reizung der Augen auftritt.
- Verwendung von kontraindizierten Medikamenten, einschließlich Augenmedikamenten.

### **Unerwünschte Reaktionen (Nebeneffekte)**

**Beim Tragen von Kontaktlinsen können folgende Symptome auftreten:**

- Verminderter Tragekomfort der Kontaktlinse oder ein Fremdkörpergefühl am Auge.
- Brennen, Reiben, Juckreiz, Trockenheit der Augen
- Tränende Augen und/oder übermäßige Tränenbildung
- Lichtüberempfindlichkeit
- Schwellung oder Entzündung der Augen (geschwollene Augenlider, Augenrötung)
- Vorübergehende Verschlechterung der Sehkraft

**Was tun, wenn solche Symptome auftreten:**

Setzen Sie die Kontaktlinsen sofort ab. Falls die Symptome dann nicht verschwinden, könnte eine ernsthafte Augenerkrankung vorliegen. Lassen Sie sich dann umgehend von Ihrem Augenarzt untersuchen, damit eventuelle Erkrankungen erkannt und gegebenenfalls behandelt werden können, um schwere Augenschäden zu vermeiden.

**Zu den Erkrankungen, die mit den genannten Symptomen einhergehen können, gehören:**

Hornhautabschürfungen, Hornhautödeme (Schwellungen), infiltrative Keratitis (Entzündung der Hornhaut), Hornhautinfektionen oder -geschwüre, Hornhautneovaskularisationen und papilläre Konjunktivitis (Augenlidentzündung).

Entsorgung über normalen Hausmüll, oder Recyclingsystem, sofern vorhanden.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde gemeldet werden.